

**Gebruiksaanwijzing**  
2015-02-13

**CuroCell® AREA**  
Zelfregelend anti-decubitusmatras

Onderdeelnummer gebruiksaanwijzing: 95-001266



## **Inhoud**

Belangrijke voorzorgsmaatregelen	3
Inleiding	3
Beschrijving van het product	7
Gebruiksaanwijzingen	9
Reinigen en in goede staat herstellen	9
Opslag	11
Problemen oplossen	11
Technische beschrijving	11
Reserveonderdelen	13
Opties en accessoires	13
Garantie	14
Overige informatie	14
Eigen aantekeningen	15

# BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

## Lees alle instructies voor gebruik

### WAARSCHUWING!

- 1 Het product mag alleen worden gebruikt voor het gebruiksdoel dat wordt beschreven in deze handleiding. Het product mag niet worden gecombineerd, samengesteld of gerepareerd met andere onderdelen, accessoires of reserveonderdelen dan die in deze handleiding of in andere documentatie van Care of Sweden worden beschreven.
- 2 Het matras wordt beschermd door een hygiënische hoes; Probeer te voorkomen dat er meerdere hygiënische hoezen tegelijk worden gebruikt met dit matras. De dampdoorlatendheid kan hierdoor namelijk teniet worden gedaan.
- 3 NIET GEBRUIKEN in de buurt van of in contact met vuur/hete oppervlakken, zoals open vuur, brandende sigaretten of hete lampen. Hoewel het product is getest op brandveiligheid, kan het beschadigd raken als het in contact komt met vuur/hete oppervlakken.
- 4 Plaats en gebruik het product zo dat het niet bekneld of beschadigd kan raken. OPMERKING: Wees bijzonder voorzichtig bij schade door beknelling wanneer u bedekken gebruikt.
- 5 Zorg er altijd voor dat het matras de juiste afmetingen heeft.
- 6 De hygiënische hoes is ondoordringbaar voor vocht of lucht, maar laat wel damp door. Zorg ervoor dat de patiënt goed ligt om gevaar voor verstikking te voorkomen.
- 7 Voorkom schade aan de hygiënische hoes door scherpe voorwerpen.
- 8 Als de hoes wordt geleverd met handgrepen aan de lange zijden, mogen deze handgrepen uitsluitend worden gebruikt voor het optillen en verplaatsen van het matras zelf. Elk ander gebruik is op uw eigen verantwoordelijkheid en valt niet onder de productgarantie.

## 1. Inleiding



Lees altijd de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

### 1.1 Algemene informatie

Dit CuroCell®-matras is een medisch hulpmiddel volgens MDD 93/42/EEC. Conform wettelijke voorschriften betreffende medische hulpmiddelen is de fabrikant verplicht om alle ongevallen of incidenten met zijn producten te melden. Wij zouden het erg op prijs stellen als u alle informatie met betrekking tot ongevallen of incidenten met onze producten onmiddellijk aan ons bij Care of Sweden meldt. Het systeem is getest en goedgekeurd volgens de volgende standaards: SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126.

## 1.2 Gebruiksdoel

CuroCell® AREA is een vervangend matras dat in diverse gezondheidszorgomgevingen kan worden gebruikt ter voorkoming van decubitus alsook voor behandeling tot en met categorie 3<sup>(1)</sup>. Geschikt voor een gebruikersgewicht van 0-230 kg.

Voor de Evac-functie is het maximale gebruikersgewicht 130 kg.



Wij raden aan om regelmatig van houding te veranderen. Hoe vaak dat gebeurt, moet worden beoordeeld door het verantwoordelijke personeel, afhankelijk van de status, diagnose en algemene toestand van de patiënt.

Het matras moet altijd worden gereinigd voordat het voor een andere patiënt wordt gebruikt.

### OPMERKING:

- Lees bij gebruik in combinatie met zitkussens de gebruiksaanwijzing van het kussen goed door voor de juiste positie van de patiënt.
- Als u dit product gebruikt in combinatie met een evacuatielaken, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker te controleren of het veilig te gebruiken is voor evacuatie.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van beddekken of andere beveiligingen op het bed, zodat het matras niet beklemd of beschadigd raakt.
- Het matras mag niet worden opgetild met een persoon erop of worden gebruikt voor andere soorten transport dan een mogelijke evacuatie met gebruik van een evacuatielaken.
- Dit matras is niet geschikt voor gebruik tijdens Röntgen-onderzoeken vanwege de kans op wazige beelden of artefacten die kunnen leiden tot diagnostische fouten.

*(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.*

## 1.3 Instructies voor evacuatie


Evac is een matrashoes met een ingebouwde functie voor het evacueren van bedlegerige gebruikers. Bij brand of in andere noodgevallen is er geen tijd om na te denken over wat je moet doen. Daarom is het uiterst belangrijk dat de veiligheidsapparatuur en de evacuatieprocedures goed zijn gepland en vooraf bekend zijn.

De Evac-hoes heeft drie handgrepen aan het hoofd- en voeteneinde. Aan de zijkanten zitten handgrepen met klittenbandstroken. Deze stroken moeten worden gebruikt om de gebruiker op het matras te fixeren voordat de evacuatie begint. De stroken zijn in de beschermzakken op de zijkant van het matras gevouwen. De uiteinden steken eruit zodat ze er makkelijk uit te trekken zijn.

### WAARSCHUWING!


De persoon die een evacuatie uitvoert, moet de benodigde training hebben genoten. Controleer altijd de apparatuur, hoes en matras voordat u begint, om zeker te weten dat de evacuatie veilig kan worden uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het veilig te gebruiken is voor evacuatie.

## Instructies voor evacuatie

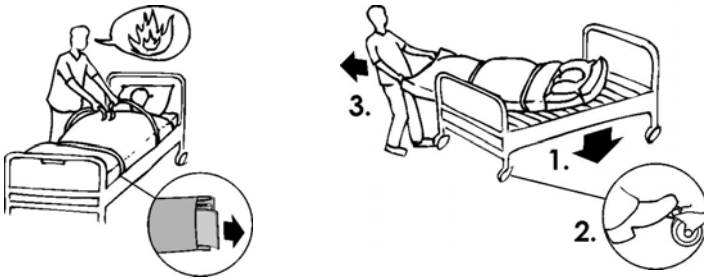

### Uit het bed

- Laat de patiënt weten wat er gaat gebeuren.
- Breng het bed omlaag en vergrendel het.
- Koppel de slangen los van de pomp.
- Trek de klittenbandstroken naar buiten en bevestig ze.
- Gebruik de buitenste handgrepen aan het voeteneinde van het bed om het matras uit het bed te draaien.
- Trek de patiënt langzaam omlaag op de vloer.

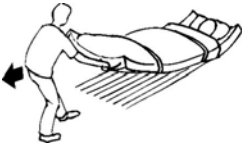

### Op een vlakke ondergrond

- Trek aan de buitenste handgrepen aan het voeteneinde van het matras.
- De werkpositie moet iets achteroverleunend zijn.

### Van de trap af

- Loop achteruit totdat het grootste gedeelte van het matras voorbij de bovenkant van de trap is.
- Keer uw rug naar de patiënt en kijk in de beweegerichting.
- Houd één hand aan de trapleuning en trek met de andere hand aan de middelste handgreep van het matras.
- Loop de trap af. Het is belangrijk om snelheid te houden, maar zonder te rennen.



### Training/oefening

Om te onthouden bij de training.

Omlaag trekken uit het bed:

- De patiënt in het bed moet niet helemaal bovenaan het matras liggen. Hij/zij zou zijn/haar hoofd dan tegen het bed kunnen stoten wanneer u het matras omlaag trekt.

Van de trap af trekken:

- Trek eerst een leeg matras van de trap af, om de techniek te oefenen.

- Bij het trainen met een persoon op het matras, kan er een koord of touw worden bevestigd in de handgrepen aan het hoofdeinde. Een andere persoon kan dan achter het matras lopen en helpen als er problemen ontstaan.
- We raden aan om op dezelfde trap te oefenen als waar een evacuatie nodig zou kunnen zijn.

Algemeen:

- Het hoofddoel van de training is niet om een hoge snelheid te behalen, maar om de juiste techniek te leren.

Hoezen voor training

- Vanwege de grote krachten op het materiaal tijdens de evacuatie, moeten de naden en handgrepen altijd worden gecontroleerd aan het einde van de training. We raden aan dat het materiaal voor de training wordt gemarkeerd met "Trainingsmateriaal" en alleen voor dit doel wordt gebruikt.

### **Uitleg**

- Als de klittenbandstroken niet worden gebruikt, bestaat het risico dat de patiënt van het matras af schuift/rolt.
- Bij trekken aan het voeteneinde hoeft er minder kracht te worden gezet, waardoor een snellere en veiliger evacuatie mogelijk is.
- Het van de trap trekken is het moeilijkste gedeelte van de evacuatie en moet extra voorzichtig worden geoefend.
- De armen van de patiënt moeten binnen de klittenbandstroken zijn. Op die manier is er minder risico dat de gebruiker iets vastpakt uit angst.

#### **OPMERKING:**

Er is een verschil in maximaal gebruikersgewicht tussen het gebruik van het Matras en het gebruik van de Evac-functie. Lees paragraaf 1.2 voor meer informatie. Om er zeker van te zijn dat de Evac-hoes goed werkt, is het belangrijk om regelmatig de kwaliteit van het matras te controleren. Controleer op schade die problemen kan veroorzaken tijdens de evacuatie.



## **1.4 Overige informatie**

### **Actieplan Decubitus**

Voor het beste resultaat wordt aanbevolen om een goed geplande en goed gestructureerde werkomgeving te gebruiken. In onze richtlijn "Actieplan" vindt u voorbeelden die u in de praktijk kunt toepassen wanneer u onze producten gebruikt.

### **Matrasgids**

Deze praktische gids biedt u als zorgverlener hulp bij het kiezen van het juiste matras uit het assortiment van Care of Sweden. CuroCell® AREA is een matras in functiegroep B. Deze informatie kunt u vinden op onze website [www.careofsweden.com](http://www.careofsweden.com) of u kunt een kopie bestellen bij onze Klantenservice door uw gegevens te sturen naar [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se).

## 2. Beschrijving van het product

Vanwege zijn unieke constructie waarin schuim en lucht worden gecombineerd, biedt dit matras een hoog gebruikerscomfort en een oplossing voor drukpuntverlaging zonder dat er een externe pomp of elektriciteit nodig zijn. Het systeem maakt gebruik van het gewicht en de bewegingen van de patiënt voor het verdelen van het interne luchtreservoir over de cellen, om altijd een lage oppervlaktedruk te behouden.

CuroCell® AREA is verkrijgbaar in drie verschillende modellen, allemaal van hoogwaardige materialen voor een goede werking en duurzaamheid.

CuroCell® AREA	Origineel ontwerp. Het schuimgedeelte is uit één stuk.
CuroCell® AREA Zone	Schuimdeel in twee lagen. Zonesysteem in het bovenste gedeelte.
CuroCell® AREA Soft	Schuimgedeelte in twee lagen, bovenste deel van visco-elastisch en HR-schuim.

Alle matrassen hebben een schuin hielgedeelte ter bescherming van de hielen.

De beschikbare maten zijn: (breedte, lengte en hoogte) 80/85/90/105/120 x 200/210 x 18 cm. Neem voor andere maten contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer.

### 2.1 Beschrijving van de hoezen

CuroCell® AREA wordt geleverd met de hygiënische hoes Steel. De hoes is eenvoudig te gebruiken en te onderhouden en voldoet aan strenge eisen van reiniging en hygiëne. De hoes is dampdoorlatend, wat het gevaar voor huidverweking vermindert. Een binnenhoes beschermt het schuim en de cellen.

Cover Steel is een hoes uit twee delen met gelaste naden en een beschermde rits. De hoes heeft functionele handgrepen voor het transport van het matras. Kleur blauw/zwart.


Er wordt ook een binnenhoes bij geleverd.

#### **Evac-hoes**

Een hoes met beschermde ritsluiting aan alle zijden, deelbaar (boven- en onderkant). Functionele handgrepen voor het transport van het matras. Kleur grijs/zwart.


## 2.2 Beschrijving van het matras

### CuroCell® AREA Zone/CuroCell® AREA Soft

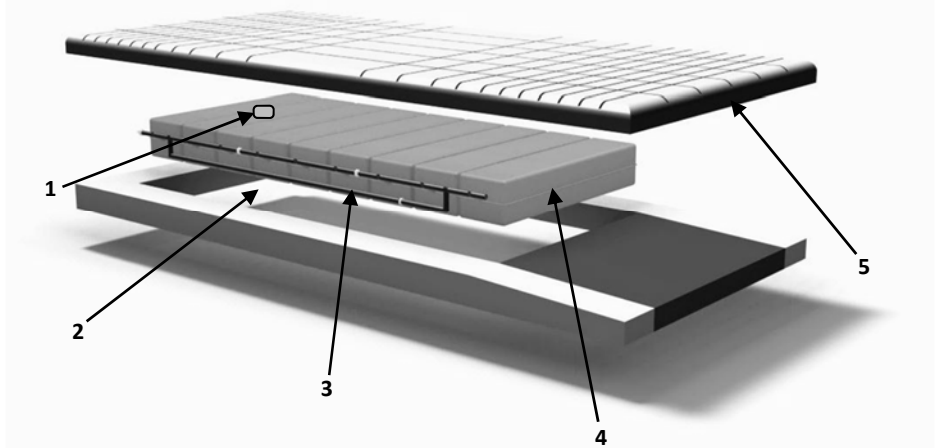

- 1 Etiket "Hoofdeinde"    2 Schuimkern    3 Buizensysteem    4 Luchtcellen    5 Bovenste deel van schuim

### CuroCell® AREA

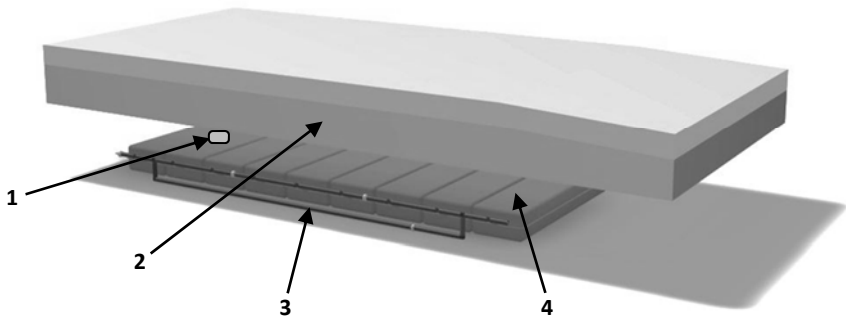

- 1 Etiket voor "Hoofdeinde"    2 Schuimkern    3 Buizensysteem    4 Luchtcellen



## 3. Gebruiksaanwijzingen

### 3.1 Het matras uitpakken

Het matras is verpakt in een doos.


1. Controleer eerst of de verpakking niet is beschadigd. Gebruik bij het openen van de doos en ander beschermingsmateriaal geen mes omdat dit het matras en de hoes kan beschadigen.
2. Leg het matras op de bedbodem en leg de hoes indien nodig goed.
3. Na enkele minuten is het product klaar voor gebruik.

### 3.2 Handcontrole

De handcontrole wordt toegepast om te controleren of het matras goed werkt. Deze controle moet regelmatig worden uitgevoerd.

Open de hoes en steek uw hand tussen de luchtcellen onder het bekkengebied van de gebruiker; houd uw hand verticaal. Er moet 2-3 vingers ruimte zijn tussen de onderkant van het matras en de patiënt. Als dat niet zo is, controleert u de cellen en de buizen.

Als het probleem dan nog niet is opgelost, neemt u contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer.

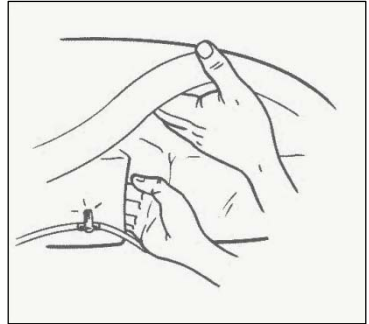

## 4. Reinigen en in goede staat herstellen

Het is belangrijk de onderstaande instructies op te volgen voordat u het product gaat gebruiken voor een andere gebruiker. Raadpleeg de verantwoordelijke voor de hygiëne of de leverancier voor hulp en instructies als u twijfels heeft.

### OPMERKING:

Controleer de hygiënische hoes steeds wanneer het product wordt gereinigd. Als de hoes is beschadigd, moet hij worden vervangen of gerepareerd.

### 4.1 Hoezen

#### MATRASHOES



Hoezen kunnen worden afgenomen met een mild reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is zoals: alcohol met of zonder tensiden, Isopropanol 70%, oxiderende oplossingen of chloor max. 1%. Uitwerpselen en bloedvlekken moeten onmiddellijk worden verwijderd met koud water. Volg nauwgezet de plaatselijke instructies en de gebruiksaanwijzing voor het reinigingsmiddel.



Hoezen met meerdere lagen moeten worden gescheiden voordat u ze wast. Wassen met gelijke kleuren.



Schoonmaakmiddelen op chloor- en fenolbasis kunnen het PU-oppervlak aantasten; gebruik deze niet. Als u chloor gebruikt, raden we een mengsel van max. 1 % aan.

### **BINNENHOES**



Maak het betreffende oppervlak schoon met een mild reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is zoals: alcohol met of zonder tensiden, Isopropanol 70 %, oxiderende oplossingen of chloor max. 1%.

## **4.2 Schuimkern**



Reinig het betreffende oppervlak met een mild reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is: alcohol met of zonder tensiden, Isopropanol 70%, oxiderende oplossingen of chloor max. 1%.

Druk het water er goed uit. Laat de schuimkern drogen in een warme, geventileerde ruimte, zonder direct zonlicht. De schuimkern moet helemaal droog zijn voordat u deze opnieuw gebruikt.

## **4.3 Luchtcellen**

1. Verwijder de hoezen. Zie de instructies in hoofdstuk 4.1 voor het reinigen van de hoezen.
2. Verwijder de luchtcellen voorzichtig uit de schuimkern. Verwijder de celhouder van de cellen.
3. Leg de luchtcellen en de buizen op een schone ondergrond die kan worden gewassen.
4. Neem de cellen en alle slangen af met een mild reinigingsmiddel dat daarvoor geschikt is zoals: alcohol met of zonder tensiden, Isopropanol 70 %, oxiderende oplossingen of chloor max. 1 %.
5. Plaats de cellen weer in de celhouder. Plaats de luchtcellen weer in de schuimkern. Controleer of alle buizen en aansluitingen goed vastzitten voordat u de hoes sluit.
6. Neem de werkoppervlakken af met een desinfectiemiddel/reinigingsmiddel op alcoholbasis dat geschikt is voor dit doel.

Als de cellen om welke reden dan ook zijn losgeraakt van de slangen, moeten ze worden vervangen volgens de tekening in hoofdstuk 2.1.

## 5. Opslag

Berg het matras op op een vlakke ondergrond of zorgvuldig opgerold/opgevouwen met de ritssluiting gesloten. Berg het matras altijd op bij kamertemperatuur in een droge ruimte. Zorg ervoor dat het matras zo wordt opgeborgen dat er niet tegenaan kan worden gestoten of geslagen en dat het niet kan worden beschadigd door andere voorwerpen. Stel het niet bloot aan direct zonlicht. Als het matras langer dan 3 maanden moet worden opgeslagen, raden we aan het op een vlakke ondergrond te leggen (niet opgevouwen of opgerold).

## 6. Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
----------	-----------

De patiënt zakt door op het matras	Open de hoezen en controleer de cellen en de buizen. Controleer opnieuw met de handcontrole (zie hoofdstuk 3.2).
------------------------------------	---

Als uw vragen niet zijn beantwoord door de bovenstaande informatie, neemt u contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer.

## 7. Technische beschrijving

### 7.1 Technische specificaties

MATRAS	SPECIFICATIE
Model	CuroCell® AREA/CuroCell® AREA Zone/CuroCell® AREA Soft
Afmetingen (BxLxH)	80/85/90/105/120 x 200/210 x 18 cm
Gewicht	16 kg (90x200x18 cm)

**OPMERKING:** De fabrikant behoudt zich het recht voor om de productspecificaties op ieder gewenst moment te wijzigen.

### **WAARSCHUWING!**

Volg de gebruik- en onderhoudsinstructies nauwgezet op om verwondingen of schade aan het product of aan de apparatuur te voorkomen.

### 7.2 Etikettering

Het matras is voorzien van een etiket met daarop productnaam, productiedatum, artikelnummer, afmeting, zorg- en wasinstructies, EAN-barcode en ruimte voor eigen etikettering. Op het product staat ook aangegeven welke zijde boven/onder en hoofdeinde/voeteneinde is.

### 7.3 Definitie van de symbolen



Artikelnr



Fabrikant

XXXX-XX-XX

Jaar-Maand-Dag



Plaatsing van de voeten



Lees de gebruiksaanwijzing



Functiegroep



CE-markering conform  
MDD 93/42/EEC



Recycling



Geen huishoudelijk afval, volg  
instructies voor recycling



Aanbevolen  
gebruikersgewicht



Patiëntinformatie  
– categorie



Direct op de bedbodem



Aanbevolen  
gebruikersgewicht bij  
gebruik van Evac-functie



Opvanging schuifkracht



Hielfunctie



Niet wassen



In de wasmachine op 95 °C



<1%  
Chloor



Geschikt voor  
trommeldrogen



Niet geschikt voor  
trommeldrogen



Nat ophangen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Afnemen



Klasse II-toestel (dubbel  
geïsoleerd)




Type BF

IP\_\_

IP-klasse  
(Ingress Protection Rating)



Temperatuurbereik

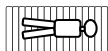

De gebruiker mag uitsluitend in de  
lengterichting op het matras liggen

## 8. Reserveonderdelen

Hoes Steel/Steel en Stone/Steel CuroCell AREA Zone

<b>Afmetingen</b>	<b>Art. nr. Topdeel Steel</b>	<b>Art.nr. Topdeel Stone</b>	<b>Art.nr. Onderste deel Steel</b>
80x200 cm	CC-925511	CC-925581	CC-925011
80x210 cm	CC-925512	CC-925582	CC-925012
85x200 cm	CC-925513	CC-925583	CC-925013
85x210 cm	CC-925514	CC-925584	CC-925014
90x200 cm	CC-925515	CC-925585	CC-925015
90x210 cm	CC-925516	CC-925586	CC-925016
105x200 cm	CC-925517	CC-925587	CC-925018
120x200 cm	CC-925519	CC-925589	CC-925019

<b>Art. nr.</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Afmetingen</b>
CC-900050	Luchtcel AREA, 1 st.	63x15x12 cm

Als er andere reserveonderdelen nodig zijn, neemt u contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer voor verdere assistentie.

## 9. Opties en accessoires

### 9.1 Opties

Stevige tas voor transport en opslag

<b>Art. nr.</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Breedte</b>
58-900905	Stevige transporttas	105-120 cm
58-900906	Stevige transporttas, extra hoog	80-90 cm
58-900911	Stevige transporttas, extra hoog	105-120 cm

### 9.2 Accessoires

Hoes Steel/Evac en Stone/Evac CuroCell AREA Zone

<b>Afmetingen</b>	<b>Topdeel Steel</b>	<b>Topdeel Stone</b>	<b>Onderste deel Evac</b>	<b>Compleet Steel/Evac</b>	<b>Compleet Stone/Evac</b>
80x200 cm	CC-926110	-	461-080200	CC-925940	-
80x210 cm	CC-926111	-	461-080210	CC-925941	-
85x200 cm	CC-926112	CC-925586	461-085200	CC-925942	CC-925862
85x210 cm	CC-926113	-	461-085210	CC-925943	-
90x200 cm	CC-926114	CC-925587	461-090200	CC-925944	CC-925864
90x210 cm	CC-926115	-	461-090210	CC-925945	-
105x200 cm	CC-926116	CC-925588	461-105200	CC-925946	CC-925866
105x200 cm	CC-926117	-	461-105210	CC-925947	-
120x200 cm	CC-926118	CC-925589	461-120200	CC-925948	CC-925868
120x200 cm	CC-926119	-	461-120210	CC-925949	-

Binnenhoes elastisch CuroCell AREA Zone

<b>Art.nr.</b>	<b>Afmetingen</b>	<b>Art.nr.</b>	<b>Afmetingen</b>
CC-928211	80x200 cm	CC-928216	90x210 cm
CC-928212	80x210 cm	CC-928217	105x200 cm
CC-928213	85x200 cm	CC-928218	105x210 cm
CC-928214	85x210 cm	CC-928219	120x200 cm
CC-928215	90x200 cm	CC-928223	120x210 cm

### **9.3 Overige accessoires**

Om het hoogste niveau van comfort te kunnen bieden, raden we het gebruik van accessoires van Care of Sweden aan, omdat onze producten erop zijn gemaakt om goed samen te worden gebruikt. Neem contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer voor accessoires of meer informatie over onze producten.

## **10. Garantie**

### **10.1 Omvang**

Dit CuroCell® systeem heeft 3 jaar garantie op fabricagefouten. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage of op storingen of schade aan het product die het gevolg zijn van nalatigheid of onjuiste behandeling/zorg.

### **10.2 Service en reparaties**

Service en onderhoud moet altijd worden uitgevoerd door Care of Sweden of een van diens erkende technici. Gebruik alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door Care of Sweden. Het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen maakt de garantie ongeldig.

Er moet een garantieclaim worden ingediend bij Care of Sweden voordat het product wordt geretourneerd.

Neem contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer als u vragen heeft met betrekking tot de garantie en de service.

### **10.3 Levensduur**

De verwachte levensduur van dit product bedraagt naar schatting 5 jaar.

## **11. Overige informatie**

### **11.1 Demontage en recycling**

Een gebruikt CuroCell® moet naar een recyclingbedrijf worden gebracht als brandbaar afval. Neem voor meer informatie contact op met Care of Sweden of met uw plaatselijke dealer.

## 12. Eigen aantekeningen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Gefabriceerd door

**care of sweden**  
Supporting Life

**Contact:**

Telefoon: + 46 771 106600

Fax: + 46 325 12840

E-mail: [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se)

Internet: [www.careofsweden.com](http://www.careofsweden.com)

**Adres:**

Care of Sweden AB

P.O. Box 146

SE-514 23 Tranemo

SWEDEN

**Bezoekadres:**

Fabriksgatan 5A

SE-514 33 Tranemo

SWEDEN

**Goederenadres:**

Byns väg 4A

SE-514 33 Tranemo

SWEDEN

**Geleverd door**